

# DracoFoam

easyfix

## Schaumstoffwundauflage mit Silikonstreifen

Zur Bewältigung überschüssigen Exsudats akuter und chronischer Problemwunden

**DracoFoam easyfix** ist eine sterile hydrophile Polyurethanschaumstoffwundauflage mit Silikonstreifen zur Abdeckung akuter und chronischer Wunden, zur Aufnahme und Speicherung von Wundexsudat sowie zur Erhaltung eines feuchten Wundmilieus. Die Fixierung mit Fixiermaterial wird durch die sanft anhaftenden Silikonstreifen erleichtert. Durch die Silikonstreifen verrutscht die Wundauflage nicht, sie sind wie eine „dritte Hand“, und man hat beide Hände für die Fixierung frei. Der flexible Polyurethan-Schaum wölbt sich in der Anwendung dem Wundgrund entgegen und besitzt ein hohes Exsudataufnahmevermögen. Die überschüssige Flüssigkeit wird zur Polyurethan-Membran transportiert, sodass diese dort abdampfen kann. Die Polyurethan-Folie verhindert das Entweichen des Exsudats und stellt eine Barriere gegen Erreger von außen dar. **DracoFoam easyfix** ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal sowie Laien im häuslichen, ambulanten und stationären Umfeld geeignet.

### Indikationen:

**DracoFoam easyfix** ist geeignet für Wunden mit hohem Exsudataufkommen, z. B. oberflächliche und tiefere akute und chronische Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell, mixtum), Dekubitus oder diabetisches Fußsyndrom, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden und Verbrennungen bis zum 2. Grad.

### Kontraindikationen:

**DracoFoam easyfix** sollte nicht bei zu trockenen Wunden und/oder bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Polyurethan oder Silikon(kleber) angewendet werden. Außerdem darf **DracoFoam easyfix** nicht bei Verbrennungen 3. Grades angewendet werden.

### Anwendungshinweise:

Vor der Anwendung von **DracoFoam easyfix** ist die Wunde zu reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig zu trocknen. Entnehmen Sie **DracoFoam easyfix** aus der sterilen Einzelverpackung und legen Sie die Wundauflage mit der unbedruckten Schaumstoffseite auf die Wunde. Die Silikonstreifen sollten nicht auf der Wunde platziert werden. Anschließend befestigen Sie die Wundauflage mit geeignetem Fixiermaterial, z. B. DracoFixiermull stretch oder elastischen Fixierbinden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schaumstoffwundauflage ausreichend über die Wundränder hinausgeht. Die Wundauflage ist mit einer sterilen Schere zuschneidbar. **DracoFoam easyfix** kann auch im Rahmen einer Kompressionstherapie eingesetzt werden. Tiefere Wunden sollten entsprechend der lokalen Behandlungsstandards und/oder gängigen Leitlinie(n) gegebenenfalls zuvor mit geeignetem Material austamponiert werden. Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoFoam easyfix** bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Das aufgedruckte Exsudatraster vereinfacht die Beurteilung der Exsudatmenge. Der Verband ist spätestens zu wechseln, wenn das Exsudat bis zum Rand des Wundkissens vorgedrungen ist.

DRACO®

## Weitere Hinweise:

**DracoFoam easyfix** ist nicht als Tamponade zu verwenden. Eine Anwendung in Kombination mit oxidierenden Lösungen (z. B. Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid) kann die Beschaffenheit und Leistung des Produkts ernsthaft beeinträchtigen und die Wundheilung stören.

Bei stagnierendem oder sich verschlechterndem Wundzustand sollte ein Arzt konsultiert werden. Bei kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden kann der Einsatz nach ärztlichem Ermessen erfolgen, wenn eine geeignete Behandlung der Infektion gewährleistet ist. Dabei ist die Verbandtragedauer gegebenenfalls zu verkürzen und die Wunde regelmäßig von einem Arzt gemäß den jeweiligen Standards zu untersuchen und zu versorgen.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

Bei beschädigtem oder vor Gebrauch unabsichtlich geöffnetem Sterilbarriersystem darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

**DracoFoam easyfix** ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung des Produkts kann dessen Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigt, die Wundheilung gestört und das Infektionsrisiko erhöht werden.

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

**DracoFoam easyfix** kann nach dem Gebrauch über den Hausmüll entsorgt werden.

## Verfügbare Größen:

5 cm x 5 cm	PZN: 19156822
10 cm x 10 cm	PZN: 19156839
10 cm x 20 cm	PZN: 19156845
20 cm x 20 cm	PZN: 19156851

 <p>Das Produkt ist für die angegebene maximale Wundgröße geeignet.</p>	 <p>Das Produkt kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden.</p>	 <p>Das Produkt haftet durch zwei Silikonstreifen am Rand sanft an und verrutscht nicht. Dadurch ist es wie eine „dritte Hand“ und ermöglicht eine einfache abschließende Fixierung mit beiden Händen.</p>
 <p>Das Produkt ist für stark exsudierende Wunden geeignet.</p>	 <p>Das Produkt ist nicht zum Duschen geeignet.</p>	 <p>Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann das Produkt bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.</p>

CE 0482         Medizinprodukt

Rev.: 240510RW-170002-GA