



# DracoTüll

Silikon

## Silikonbeschichtetes Wunddistanzgitter

### Zum Schutz akuter und chronischer Problemwunden

**DracoTüll Silikon** ist eine sterile Wundkontaktauflage zur Verwendung als Wunddistanzgitter in kombinierter Versorgung akuter und chronischer Wunden.

**DracoTüll Silikon** dient der Abdeckung und dem Schutz der Wunde. Das silikonisierte Gitternetz ermöglicht ein Abfließen des Wundexsudats in den Sekundärverband. Die weiche Silikonsschicht bewirkt ein leichtes Anhaften des Produkts. Gleichzeitig wird ein Verkleben der Sekundärwundauflage mit dem Wundgrund oder mit gegebenenfalls empfindlicher Wundumgebungs-haut verhindert und damit ein atraumatischer Verbandwechsel und die notwendige Wundruhe unterstützt.

**DracoTüll Silikon** ist zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal sowie Laien im häuslichen, ambulanten und stationären Umfeld geeignet.

### Indikationen:

**DracoTüll Silikon** ist für schwach bis stark exsudierende Wunden geeignet, die eine kombinierte Versorgung benötigen, z.B. oberflächliche akute und chronische Wunden wie Ulcus cruris (venös, arteriell), Dekubitus oder diabetisches Fußsyndrom, Spalthautentnahmestellen, postoperative Wunden und Verbrennungen bis zum 2. Grad. Auch bei nicht-exsudierenden Wunden, Schürfwunden oder empfindlicher Haut bietet **DracoTüll Silikon** einen sehr guten Schutz vor Sekundärverletzungen der Wunde und/oder Wundumgebungs-haut.

### Kontraindikationen:

**DracoTüll Silikon** darf nicht bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Silikon angewendet werden. Außerdem darf **DracoTüll Silikon** nicht bei Verbrennungen 3. Grades oder in Wundhöhlen angewendet werden.

### Anwendungshinweise:

Entnehmen Sie **DracoTüll Silikon** aus der sterilen Einzelverpackung und legen Sie die Wundauflage auf die Wunde. Dabei ist darauf zu achten, dass **DracoTüll Silikon** auf jeder Seite ausreichend über die Wundränder hinausgeht. Anschließend decken Sie **DracoTüll Silikon** mit der bevorzugten, absorbierenden Sekundärwundauflage, z.B. mit DracoFoam, DracoFoam haft oder einer sterilen Saugkompressen, ab. Fixieren Sie gegebenenfalls den Sekundärverband mit geeignetem Fixiermaterial, z.B. DracoFixiermull stretch oder elastischen Fixierbinden, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Vor der Anwendung von **DracoTüll Silikon** ist die Wunde zu reinigen und die Wundumgebungs-haut sorgfältig zu trocknen. Die Wundauflage ist mit einer sterilen Schere zuschneidbar.

**DracoTüll Silikon** kann auch im Rahmen einer Kompressionstherapie eingesetzt werden.

Tiefe Wunden sollten entsprechend der lokalen Behandlungsstandards und/oder gängigen Leitlinie(n) gegebenenfalls zuvor mit geeignetem Material austamponiert werden.

Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoTüll Silikon** bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.



DRACO<sup>®</sup>

#### Weitere Hinweise:

Bei stagnierendem oder sich verschlechterndem Wundzustand sollte ein Arzt konsultiert werden. Bei kritisch kolonisierten oder infizierten Wunden kann der Einsatz nach ärztlichem Ermessen erfolgen, wenn eine geeignete Behandlung der Infektion gewährleistet ist. Dabei ist die Verbandtragedauer gegebenenfalls zu verkürzen und die Wunde regelmäßig von einem Arzt gemäß den jeweiligen Standards zu untersuchen und zu versorgen.

Eine Wunde steht immer im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus. Die Beseitigung aller Faktoren, die eine Wundheilung hemmen können, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Wundbehandlung.

Bei beschädigtem oder vor Gebrauch unabsichtlich geöffnetem Sterilbarriersystem darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

**DracoTüll Silikon** ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung des Produkts kann dessen Beschaffenheit und Leistung ernsthaft beeinträchtigt, die Wundheilung gestört und das Infektionsrisiko erhöht werden.

Sollte dieses Produkt in Zusammenhang mit einem schwerwiegenden Vorkommnis stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zu melden.

**DracoTüll Silikon** kann nach dem Gebrauch über den Hausmüll entsorgt werden.

#### Verfügbare Größen:

5 cm x 5 cm

PZN: 09515160

10 cm x 10 cm

PZN: 08839788



Das Produkt ist für die angegebene maximale Wundgröße geeignet.



Das Produkt ist für stark exsudierende Wunden geeignet.



Das Produkt ist nicht zum Duschen geeignet.



Das Produkt kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden.



Die Wundauflage ist mit einer leicht anhaftenden Silikonschicht überzogen.



Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann das Produkt maximal 7 Tage auf der Wunde verbleiben.

CE 0482

STERILE EO



25°C

Rev.: 240730XRW-13974-GA

MD

Medizinprodukt



Dr. Ausbüttel & Co. GmbH • Ernst-Abbe-Straße 4  
44149 Dortmund • Deutschland • www.draco.de